



Laktator Symphony z kartą **PREEMIE+** Program **PREEMIE+ 1.0**

Przeznaczony jest dla matek wcześniaków oraz jako pierwszy wybór po urodzeniu dziecka donoszonego.

Sposób użytkowania:



Żeby włączyć laktator w tryb programu PREEMIE+ 1.0, naciśnij przycisk ON/OFF.



Na wyświetlaczu pojawi się napis „for Preemie+”.



W ciągu 10 sekund naciśnij przycisk „kropelki”.



Poprzez płynne przekręcenie żółtego pokrętki dostosuj poziom podciśnienia do własnych potrzeb. Rekomendowane jest takie ustawienie, by siła ssania była maksymalnie wysoka, ale nadal odczuwana jako komfortowa.



Program PREEMIE+ trwa 15 min. W tym czasie laktator będzie samoistnie zmieniał rytmy pracy, trzykrotnie wchodząc w krótką pauzę. Po zakończeniu cyklu na wyświetlaczu pojawi się napis DONE.

Jeśli w każdej z 3 kolejnych sesji odciągania uzyskasz co najmniej 20 ml pokarmu, możesz przejść w standardowy tryb odciągania pokarmu (program standard 2.0)