

Laktator Symphony z kartą **PREEMIE+** Program **STANDARD 2.0**

Przeznaczony jest dla matek, które osiągnęły gotowość laktacyjną, czyli w każdej z 3 kolejnych sesji odciągania uzyskały co najmniej 20 ml pokarmu.




Sposób użytkowania:

Żeby włączyć laktator w tryb programu STANDARD 2.0 naciśnij przycisk ON/OFF



Na wyświetlaczu pojawi się napis „for Preemie+”. Zaczekaj kilka sekund aż na wyświetlaczu pojawi się informacja „Start Standard”.

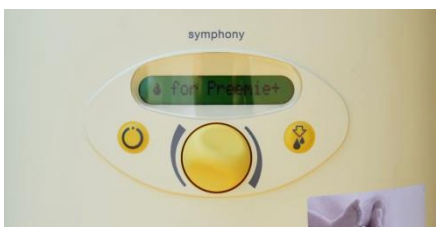

Program STANDARD jest uruchomiony.



Laktator pracuje w fazie stymulacji wypływu. Poprzez płynne przekręcenie żółtego pokrętki dostosuj poziom podciśnienia do własnych potrzeb. Rekomendowane jest takie ustawienie, by siła ssania była maksymalnie wysoka, ale nadal odczuwana jako komfortowa.



Jeżeli zobaczysz, że pokarm zaczyna wypływać, naciśnij przycisk „kropelki”, by uruchomić drugą fazę – odciągania właściwego.

Jeżeli nie naciśniesz tego przycisku laktator po 2 minutach automatycznie przełączy się na fazę odciągania właściwego.



Laktator pracuje w trybie odciągania właściwego.

Poprzez płynne przekręcenie żółtego pokrętki dostosuj poziom podciśnienia do własnych potrzeb. Rekomendowane jest takie ustawienie, by siła ssania była maksymalnie wysoka, ale nadal odczuwana jako komfortowa.

Pracując w tym trybie możesz używać laktatora tak długo jak potrzebujesz.

